

# BIGUANID FLÄCHE N

## Sıvı Konsantre Yer-Yüzey Dezenfektanı

- İyi temizleme özellikleri olan aldehitsiz preparattır.
- Noro virüsü ve tüberküloza karşı etkilidir.
- Hoş kokan parfüm içerir.

### Ürün Özellikleri

**Biguanid Fläche N** medikal alanlarda her türlü yer, yüzey ve eşyanın temizliği ve dezenfeksiyonu için aldehitsiz ve fenolsüz bir üründür. Aynı zamanda gıda endüstrisi ve kantin mutfakları içinde kullanımı uygundur.

**Biguanid Fläche N** hoş olmayan kokuların istenmediği, yüksek hijyenik taleplerin arandığı tüm alanlar için kuvvetle tavsiye edilir.

Formülasyonu Kuartener Amonyum Bileşikleri esaslıdır. Ürün çok etkili korozyon önleyicileri içerir ve hem tüberküloza hemde Noro virüsüne karşı etkilidir.

**Biguanid Fläche N** medikal uygulamalarda hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirir(TRGS 525/540).

### Kullanım Alanları

**Biguanid Fläche N**, klinikler, muayenehaneler, laboratuvarlar gibi tüm medikal alanlarda her türlü yer, yüzey ve eşyanın temizliği ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Gıda sektörü, büyük çaplı mutfaklar ve kantin mutfaklarının tüm alanlarında yer-yüzey dezenfeksiyonu için uygundur. Aldehitsiz ve fenolsüz bir üründür.

**Biguanid Fläche N**, hoş olmayan kokuların istenmediği, yüksek hijyenik taleplerin arandığı tüm alanlar için tavsiye edilir. PVC (polivinil klorür), linolyum yüzeylerde ve akrilik camlarda kullanılır. Aynı zamanda banyo kabinlerinin dezenfeksiyonunda kullanıldığı gibi alkolsüz hızlı dezenfeksiyon içinde kullanılabilir.

### Kullanım Şekli

1. Ovalama ve silme yöntemi ile.  
Örn.;2 kova metodu ya da buna benzer metotlar
  2. Merkezi veya merkezi olmayan dozajlama aletleri ile.(BAM, ZNG 12, WINCO ZEL 12, DG 1, DG 2, DG 3 için test edilmiştir.)
  3. Yıkama makineleri ile kullanılır.
  4. Sabit veya mobil aletlerden püskürtülerek.
  5. Termal olmayan yatak lazımlığı dezenfeksiyonu için.
- Uyarı** : Çok aşırı kirlenmiş yüzeylerde, ek deterjan olarak sadece non-iyonik bazlı tensitler (Hansa Clean Special Cleaner) kullanınız.  
Optimal yer bakımı için ürün Ga N T<sub>222</sub> katılabilir.  
(Uyumluluk bilirkişi raporu ile kanıtlanmıştır.)

### Antimikrobiyal Özellikler

#### Biguanid Fläche N ;

- Bakterisid (incl.MRSA)
- Tüberkülozid
- Fungisid (C.albicans), levurosid,
- Virüs inaktive edici (HBV/HIV, HCV, Noro-Viren, Rota-,Papova-/Polyoma-, Adeno-, Vaccinia-Virüsleri)



Yer-Yüzey Dezenfeksiyonu

- DGHM/VAH güncel dezenfektan listesindedir.
- DVG'nin güncel dezenfektan listesindedir.

### Bileşimi

100 g aktif madde :  
16,0 g benzylalkydimethyl ammonium chloride

Üründeki tüm yüzey aktif maddeler (tensitler) EU deterjan yönetmeliğine göre biyolojik olarak parçalanabilir.

### Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

**Konsantrenin Görünüşü**: berrak, mavi-yeşil sıvı  
**pH- değeri,seyreltilmemiş çözeltinin** : 8,5+/-0,5  
**Yoğunluk** : ca.1.00g/ml

### Kullanım Konsantrasyonları ve Temas Süreleri

**DGHM/VAH rehberine göre bakterisid MRSA dahil, fungisid (C.albicans) / levurosid etki etme süresi:**  
(DGHM: Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği)  
Yüksek organik yük altında test edilmiştir.

	%1,0	15 dakika
	%0,5	1 saat
	%0,25	4 saat
Hızlı dezenfeksiyon:	%3	1 dakika
	%2	5 dakika
Mycobacterium terrae (Tbc)	%0,5	1 saat

RKI'a göre tüm zarflı virüslerin inaktivasyonunda;		
HCV/BVDV/HIV/HBV dahil	%0,5	15 dakika
Noro-Virüsü (FCV)	%1	2 saat
Rota-Virüsü	%0,25	15 dakika
Papova-/Polyoma-Virüsü	%1	1 saat
Adeno-Virüsü	%2	4 saat
Vaccinia-Virüsü	%0,5	5 dakika

### DVG'ye göre etki süresi (gıda alanında)

Bakterisid : Sütun 6b : %0,5 1 saat  
Sütun 8b : %0,5 1 saat

Fungisid : Sütun 7b : % 0,5 1 saat  
Sütun 9b : % 0,5 1 saat

- \*DGHM= Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği
- \*VAH= Uygulamalı hijyen birliği
- \*DVG= Veteriner ilaçları için Alman derneği

### Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj Şekilleri
2 litre şişe	6 x 2 litre
5 litre bidon	3 x 5 litre
10 litre bidon	1 x 10 litre

### Dozajlama Yardımcıları

2 litre şişe, 5 ve 10 litre bidonlar için dozajlama pompası, bidonlar için boşaltma musluğu, dozajlama makineleri

# BIGUANID FLÄCHE N

## Yüzey Temizliği ve Dezenfeksiyonu İçin Konsantre Yer-Yüzey Dezenfektanı



Yer-Yüzey Dezenfeksiyonu

### Bilirkişi Raporları

- \***Prof.Dr.Schubert**, Hijyen Uzmanı, Frankfurt/M:  
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu 15.08.2006.  
-Tüberkülozid etkisi üzerine bilirkişi raporu, 30.03.1998.
- \* **Dr.med.F.-A.Pitten**, Hijyen Uzmanı, Gießen:  
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu 27.08.2006.  
-Hızlı dezenfeksiyon etkisi üzerine bilirkişi raporu, 21.12.2006
- \***Dr.Brill**, Hijyen Uzmanı, Hamburg:  
-Desco Wipes sistemlerinde kullanılan Biguanid Fläche N'nin mikrobiyosidal stabilitesinin incelenmesi 08.11.2006.  
-DVG'ye göre gıda sektöründe kullanım uygunluğu için bilirkişi raporu, 20.12.2006.
- \***Prof.Dr.Bülte, Gießen**:  
-DVG'ye göre gıda sektöründe kullanım uygunluğu için bilirkişi raporu, 16.09.2008.
- \***Prof. Dr. Steinmann**, Virolog, Bremen:  
-Rota virüs id etkisi bilirkişi raporu, 17.10.1990  
-Papova/polyoma virüs id etkisi bilirkişi raporu, 31.08.1998.  
-FCV (norwalk like virüs) virüs id etkisi bilirkişi raporu, 13.01.2003.  
-Hepatit C (BVDV) virüs id etkisi bilirkişi raporu, 20.08.2005.  
-Adeno virüs id etkisi bilirkişi raporu, 11.06.2005  
-Vaccinia virüs id etkisi bilirkişi raporu, 03.06.2005.
- \***Konrad Hornschuch AG**: Skai padding malzemede kullanılabilirliği hakkında tavsiye, 09.08.2005
- \***Fa.Schmitz&Söhne, Wickede**: Schmitz&Söhne tarafından üretilen medikal envantere Cleanisept kullanımının uygunluğuna dair yazı, Mart 2006

### Uyarılar

Yutulması halinde zararlıdır. Yanıklara neden olur. Sucul organizmalar için çok toksiktir. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Kaza halinde ve ya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (mümkünse etiketi gösterin.) Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Çevreye saliverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun. Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanmadan önce etiketi mutlaka okuyunuz. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'in 144 nolu telefonunu arayınız.

Dezenfektanları güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanımından önce etiket ve ürün bilgi formunu okuyunuz.

#### İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.A.Ş  
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33  
Torbalı / İzmir  
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87  
[www.desomedeuro.com](http://www.desomedeuro.com)  
E-mail: [info@desomedeuro.com](mailto:info@desomedeuro.com)

### Ruhsatlandırma

- \* T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Biyosid Envanterine kayıtlıdır.
- \*DGHM / VAH' nin güncel dezenfektan listesine kayıtlıdır.  
\*Gıda alanında DVG'nin (Veteriner İlaçları için Alman derneği) güncel dezenfeksiyon listesine kayıtlıdır.
- \*Baua'da (Koruyucu ve Mesleki Hekimlik üzerine Alman Enstitüsü) Biosid Kanununa göre Biosid ürün olarak kayıtlıdır.  
baua ruhsat no: N-23377 ve N-34780



#### Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH  
Postfach 1162 D -34201  
Melsungen/Almanya  
Tel.:+049-5664-9496-0  
[www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)