

CLEANISEPT SPRAY®

**Kullanıma Hazır Yüksek Etkili
Püskürtme ve Silme İçin
Yüzey Dezenfektanı**

Aldehitsiz, Fenolsüz, Alkolsüz

Ürün Özellikleri

Aldehit, fenol ve alkol içermez. Tıbbi cihaz yüzeyleri için alkol içermeyen hızlı dezenfeksiyonda kullanılır. Çok iyi yağ çözme özelliğine sahip olup, toksisitesi çok düşüktür.

Kullanım Alanları

Bebek odaları, küvezler, yoğun bakım ve reanimasyon servislerinde tıbbi cihaz yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Ayrıca vajinal ve karın bölgesinin muayenesinde kullanılan ultrason problemleri gibi alkole karşı hassas tıbbi cihazların dezenfeksiyon ve temizliği için kullanılır. Kokusuzdur, bu sebeple özellikle dezenfeksiyon işlemi sırasında koku oluşumu istenmeyen alanlarda kullanılır. Akriolik camlarda kullanılır. Çok kısa sürede etki edebilme özelliğinden dolayı alkol içeren hızlı dezenfektanlara alternatif olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

Püskürtme ve silme yöntemi ile: Yüzey ve köşelere en az 30cm uzaklıktan Cleanisept Spray'i ,yüzeyler tamamen ıslanincaya kadar püskürtün,etki süresinin geçmesinden sonra temiz bir bezle siliniz.

Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid (TB bacillus, MRSA dahil)
Fungusid
Virüs inaktive edici (HIV/HCV/HIV, Papova/Poyama Rota)

Bileşimi


Cleanisept Spray®, Cleanisept'den %7,5 oranında DESOMED EURO KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından seyreltilerek ambalajlanmıştır.
100 g Cleanisept,
6,66 g. alkylbenzyldimethyl ammonium chloride
3,33 g. dialkyldimethyl ammonium chloride içerir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Görünüm : Berrak,renksiz çözelti
pH değeri : 8,5-11,0
Yoğunluğu (20°C) : 0,995 – 1,005 g/cm³

**Alkolsüz
Aldehitsiz
Fenolsüz
Dezenfeksiyon çözeltisi
DGHM/VAH listesinde
kayıtlıdır.**

CE0482

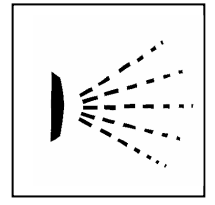

Antimikrobiyel Özellikleri ve Temas Süresi

KULLANIMA HAZIRDIR.SEYRELTMİYİNİZ!!!

Kısa süreli etki :

Bakterisid (TB bacillus, MRSA dahil), fungusid (c.albicans) / levurosid HBV, HCV, HIV, gibi zarflı virüsler ve Rota virüsü için

1dak.

Papova/Palyoma virüsü için etkinlik süresi:

5 dk.

Ambalaj Şekilleri

Ambalaj şekli	Dağıtım şekli
1 litre PE şişe	12 x 1 litre
2 litre PE bidon	6 x 2 litre
5 litre PE bidon	3 x 5 litre
10 litre PE bidon	1 x 10 litre

Bilirkişi Raporları

*Dr.Schumacher GmbH:
-Cleanisept Spray akrilik cam uygunluğu raporu, 19.03.2007
* İstanbul Üniversitesi
-Mikrobiyolojik Etkinlik Raporu, 26.06.2008

Uyarılar

Kuarterner amonyum bileşikleri içerir. Yutulduğu takdirde sağlığa zararlıdır. Yutmayınız. Solüsyon ile cilt ve göz temasını önleyiniz. Gözlere temas halinde bol suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ruhsatlandırma

*CLEANISEPT, DGHM/VAH' nin güncel dezenfektanlar listesine kayıtlıdır.

*93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.

EU Authorised Representative
Dr. Schumacher GmbH
34201 Melsungen/GERMANY
Tel.: 056 84/9496-0
01805-SCHUMACHER
http://www.schumacher-online.com

Üretici Firma:


Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad.
No: 33 Torbalı / İZMİR
Telefon : 0 (232) 853 97 17
Fax : 0 (232) 853 90 69