

DESCOCEPT AF

Alkol Bazlı Hızlı Yüzeý Dezenfektanı

CE 0482

- **Aldehitsiz, hoş kokulu hızlı yüzeý dezenfektanı**
- **Noro virüsü dahil kapsamlı virüsid etkinliđi**
- **Dermatolojik olarak test edilmiştir.**

Ürün Özellikleri

Descosept AF etanol ve kuarterner amonyum bileşikleri temelinde dayanan,aldehit içermeyen kullanıma hazır, hızlı tıbbi cihaz yüzeýi dezenfektanıdır.

Descosept AF cilt tarafından iyi tolere edilir ve hoş kokuludur. Aldehit içermediđi için uygulama sonrası yüzeýlerde renk deđişimi yapmaz. Noro virüsü dahil kapsamlı virüs etkinliđine sahiptir.

Hızlı dezenfeksiyon gerektiren tüm alanlar için uygun bir yüzeý dezenfektanıdır:

Alkole hassas yüzeýlerde (akrilik camlarda) kullanmayınız.

Descosept AF, medikal uygulamalarda hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliđinin gerekliliklerini yerine getirir. (TRGS 525/540).

Kullanım Alanları

Descosept AF, kullanıma hazır alkol içerikli tıbbi cihaz yüzeýi dezenfektanıdır. Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan klinikler, muayenehaneler, laboratuvarlar gibi tüm medikal alanlarda alkole dayanıklı tıbbi cihaz yüzeýlerinin (hasta yatakları, muayene masaları, ameliyat masaları, sedyeler, ameliyat lamba sistemleri, uv lambalar, cerrahi önlük ve eldivenler vb.) dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda diş hekimliđi ünitelerinde, göz doktoru muayenehanelerde ve optikçilerde kısa süreli ve etkili dezenfeksiyon için kullanılır. Özellikle ulaşılmaması zor yüzeýler için uygundur.

Kullanım Şekli

Yüzeý ve objelere en az 30 cm uzaklıktan tamamen ıslanmaya kadar **Descosept AF'** yi püskürtün, etki süresinin geçmesinden sonra yüzeýde kalan dezenfektanı temiz bir bez ile siliniz.

Havanın alkol ile yüklenmesini önlemek (ex protection) için **Descosept AF'** yi tek kullanımlık mendile püskürtün ve yüzeýleri ıslanmasını sađlayarak silin.

Descosept AF pratikte yüzeýlerde herhangi bir film tabakası bırakmaz.

Antimikrobiyal Özellikleri

- Bakterisid (MRSA dahil)
- Tüberkülozid
- Fungusid, levurosid
- Virüs inaktivasyonu
HBV/HIV/HCV/BVDV/Rota/Adeno/Vaccinia/
Noro/ İnfluenza virüsleri dahil

Bileşimi

100 g çözelti: 42 g Etanol,
0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid içerir.

Antimikrobiyel Özellikleri ve Temas Süreleri

DGHM/VAH rehberine göre bakterisid (MRSA dahil, fungusid (C.albicans) / levurosid etki etme süresi :

1dakika*
(*DGHM/VAH listesinde 5dk. da kayıtlıdır.)

Tüberkülozid (M.terrae) 1 dakika
Aspergillus niger 30 dakika

RKI'ne göre tüm zarflı virüslerin inaktivasyonu için Vaccinia,
BVDV,HBV,HIV,HCV

Rota/Adeno virüsleri 30 saniye
Noro virüsü (FCV) 1 dakika
15 dakika

***DGHM**= Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliđi
VAH= Uygulamalı hijyen birliđi

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri


Konsantrenin görünümü : berrak,renksiz çözelti
pH deđeri : 7 ± 1

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
1litre PE	12x1 litre
5 litre PE bidon	3x5 litre
10 litre PE bidon	1x10 litre

Dozajlama Yardımcıları

1 litrelik şişeler için spray başlıđı, bidonlar için aktarma musluđu.

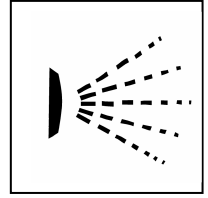

DESCOSEPT AF

Alkol Bazlı Hızlı Yüzey Dezenfektanı

CE 0482

Bilirkişi Raporları

- *Dr.Pitten**, Hijyenist, Frankfurt:
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi Raporu, 21.09.2009
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu, 11.04.2008
-Tüberklozid etkinliğine ilişkin bilirkişi raporu, 21.09.2009
- *Prof.Dr.Rotter**, Dip.Bact.(London),Vienna:
DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu,28.02.2006.
- *Dr.Steinmann**, Hijyenist, Frankfurt:
-Adeno virüs id etkisi bilirkişi raporu, 03.05.2001
-FCV (Noro-Viren) virüs id etkisi bilirkişi raporu, 04.04.2005
-Vaccinia virüs id etkisi bilirkişi raporu, 12.12.2005
-Hepatit C (BVDV) virüs id etkisi bilirkişi raporu, 12.12.2005
-H1N1 virüs id etkisi bilirkişi raporu, 13.08.2009
- *Dr. Werner**, Hijyenist, Schwerin:
Tuberkulosid etkinliğine ilişkin bilirkişi raporu, 22.09.2009
- *Dermatest** , Münster:
Cilt irritasyon özelliklerine ait bilirkişi raporu (epidermal test),26.05.2000.
- *Dr.Brill, Hijyenist**, Hamburg:
-Sporozid Virüs id etkisi bilirkişi raporu, 12.06.2009
- Desco Wipes mendillerde dezenfeksiyon aktivitesi raporu, 21.03.2007
- Desco Wipes mendillerle uyumluluk-mikrobiyolojik stabilite raporu, 08.11.2006
- Desco Wipes mendillerle uyumluluk-mikrobiyolojik stabilite raporu, 13.06.2007
- *Dr.Schumacher GmbH; Melsungen
-Rota virüsüne karşı etkinlik onayı; 23.03.2010

Uyarılar

Alevlenir. Buhar veya zerrecelerini solumayınız. Ambalajı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin. Bu ürün ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanmadan önce etiketi mutlaka okuyunuz.

Dezenfektanları güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanımından önce etiket ve ürün bilgi formunu okuyunuz.

Ruhsatlandırma

- * DGHM/VAH'ın dezenfektan listesinde kayıtlıdır.
*93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.A.Ş
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33
Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87
www.desomedeuro.com
E-mail: info@desomedeuro.com



Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Postfach 1162 D -34201
Melsungen/Almanya
Tel.:+049-5664-9496-0
www.schumacher-online.com