

DESCOCEPT AF TÜCHER/ DESCOCEPT AF WIPES

Alkol Bazlı Yüze Dezenfeksiyon Mendili

- Hoş kokulu aldehitsiz dezenfeksiyon mendilidir.
- Noro virüsü dahil kapsamlı virüs etkisi vardır.
- Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Ürün Özellikleri

Descosept AF Tücher mendiller kullanıma hazırdır dezenfektan solüsyonunun bileşimi etanol ve kuaterner amonyum bileşiklerine dayanır. Hoş bir kokuya sahiptir ve cilt tarafından iyi tolere edilir. **Descosept AF Tücher** aldehitsiz olmasından dolayı kullanımından sonra renk değişimi yapmaz.

Descosept AF Tücher alkol hassas yüzeyler (akrilik camlar) hariç tüm yüzeylerde kullanılabilir.

Descosept AF Tücher medikal faaliyetlerde hassasiyet yaratıcı maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirir (TRGS 525/540).

Kullanım Alanları

Descosept AF Tücher, kullanıma hazır alkol içerikli tıbbi cihaz yüzeyi dezenfektanlı mendildir. Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan klinikler, muayenehaneler, laboratuvarlar gibi tüm medikal alanlarda alkol dayanıklı tıbbi cihaz yüzeylerinin (hasta yatakları, muayene masaları, ameliyat masaları, sedyeler, ameliyat lamba sistemleri, uv lambalar, cerrahi önlük ve eldivenler vb.) dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda diş hekimliği ünitelerinde, göz doktoru muayenehanelerde ve optikçilerde kısa süreli ve etkili dezenfeksiyon için kullanılır.

Kullanım Şekli

Kutunun içindeki mendil poşetini açın. Bir tane mendili rulodan çekin, kutunun kapağının ortasından geçirip dışarı çekin ve kapağı kutunun üzerine yerleştirin. **Descosept AF Tücher** ile yüzey ve objeler tamamen ıslanincaya kadar silin. Etki süresi geçtikten sonra gerekli ise yüzeyde kalan dezenfektanı silin. **Descosept AF Tücher** uygulandığı yüzeyde kalıntı bırakmaz.

Yalnızca orijinal etiketli Descosept AF refill mendilleri kullanınız.

Antimikrobiyal Özellikleri

- Bakterisid (MRSA dahil)
- Tüberkülozid
- Fungusid / levurosid
- Virüs inaktive edici (HBV/HIV,HCV,BVDV,Adeno, Rota, Vaccinia,Noro, İnfluenza virüsleri dahil)



**Aldehitsiz
Fenolsüz
Dezenfeksiyon solüsyonu
DGHM/VAH listesindedir.
Dermatolojik olarak test
edilmiştir.**

Dezenfeksiyon Mendili

CE 0482

Bileşimi

Mendile emdirilmiş 100 g Descosept AF çözeltisi; 42,0 etanol, 0,05 g didecylidimethylammoniumchlorid aktif maddelerini içerir.

İçeriği: 1 kutu/Refill 14x20 cm boyutlarında 120 adet mendil içerir. Kutu başına 210 g Descosept AF çözeltisi içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Bilgiler **Descosept AF** çözeltisine aittir:
Konsantrenin görünümü : berrak,renksiz çözelti
pH değeri : 7 +/- 1,0
Yoğunluk (20°C) : 0,924 -0,932g/ml

Antimikrobiyal Özellikleri ve Temas Süreleri

DGHM/VAH/ÖGHMP rehberine göre; bakterisid, MRSA dahil, fungusid (C.albicans) / levurosid etki etme süresi: 1 dakika *

* DGHM/VAH listesinde 5 dak. sütununda kayıtlıdır.)

Tüberkülozid (M.terrae) 1 dakika
Aspergillus niger 30 dakika

RKI Enstitüsüne göre tüm zarflı virüslerin inaktivasyonunda; Vaccinia, BVDV, HBV,HIV,HCV 30 saniye

Rota/Adeno virüsleri : 1 dakika
Noro virus (FCV) : 15 dakika

***DGHM**= Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği
VAH= Uygulamalı hijyen birliği

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
PE-120 mendillik kutu	12x1kutu
120' mendillik dolun paketi (refill)	12x1 paket

DESCOCEPT AF TÜCHER/ DESCOCEPT AF WIPES



CE 0482

Bilirkişi Raporları

- *Dr.Pitten**, Hijyenist, Frankfurt:
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu, 21.09.2009
-DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu, 11.04.2008
-Tüberklozid etkinliğine ilişkin bilirkişi raporu, 21.09.2009
- *Prof.Dr.Rotter**, Dip.Bact.(London),Vienna:
DGHM/VAH rehberine göre yüzey dezenfeksiyonu bilirkişi raporu,28.02.2006.
- *Dr.Steinmann**, Hijyenist, Frankfurt:
-Adeno virüs etkisi bilirkişi raporu, 03.05.2001
-FCV (Noro-Viren) virüs etkisi bilirkişi raporu, 04.04.2005
-Vaccinia virüs etkisi bilirkişi raporu, 12.12.2005
-Hepatit C (BVDV) virüs etkisi bilirkişi raporu, 12.12.2005
-H1N1 virüs etkisi bilirkişi raporu, 13.08.2009
- *Dr. Werner**, Hijyenist, Schwerin:
Tüberkulosid etkinliğine ilişkin bilirkişi raporu, 22.09.2009
- *Dermatest** , Münster:
Cilt irritasyon özelliklerine ait bilirkişi raporu (epidermal test),26.05.2000.
- *Dr.Brill, Hijyenist**, Hamburg:
-Sporozid Virüs etkisi bilirkişi raporu, 12.06.2009
- Desco Wipes mendillerde dezenfeksiyon aktivitesi raporu, 21.03.2007
- Desco Wipes mendillerle uyumluluk-mikrobiyolojik stabilite raporu, 08.11.2006
- Desco Wipes mendillerle uyumluluk-mikrobiyolojik stabilite raporu, 13.06.2007

Uyarılar

Alevlenir. Buhar veya zerrecelerini solumayınız. Ambalajı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.- Sigara içmeyin. Bu ürün ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Çocuklardan uzak tutunuz. Kullanmadan önce etiketi mutlaka okuyunuz.

Dezenfektanları güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanımından önce etiket ve ürün bilgi formunu okuyunuz.

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.Aş.
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33
Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87
www.desomedeuro.com
E-mail: info@desomedeuro.com

Ruhsatlandırma

- * DGHM/VAH'ın dezenfektan listesinde kayıtlıdır.
- *Baua'da (Koruyucu ve Mesleki Hekimlik üzerine Alman Enstitüsü'nde) biosid Kanununa göre biosid ürün olarak kaydedilmiştir. Baua kayıt no: N 20338
- *93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.



Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Postfach 1162 D -34201
Melsungen/Almanya
Tel.:+049-5664-9496-0
www.schumacher-online.com