


DESCOTON %2 GDA

kullanıma hazır
formaldehitsiz
fenolsüz

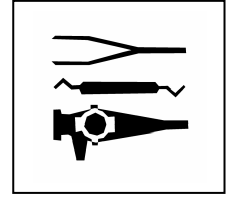

Aletler ve Endoskoplar İçin %2 Glutaraldehit İçerikli Yüksek Etkili Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

Ürün Özellikleri

Descoton %2 GDA kullanıma hazırdır. Tıbbi aletlerin, flexible ve rijid endoskopların dezenfeksiyonu için kullanılan, formaldehit içermeyen bir preparattır. Çok etkili korozyon inhibitörleri içerir.

Kullanım Alanları

Descoton %2 GDA flexible ve rijid endoskopların dezenfeksiyonu yanı sıra her türdeki cerrahi aletin,ısıya dayanıksız anestezi aksesuarlarının ve laparaskopi aletlerinin dezenfeksiyonu için çok uygundur.

Kullanım Şekli

Hasarsız,sağlam aletleri kullandıktan hemen sonra çözelti içine daldırınız. Tüm yüzeyler ve boşluklar çözelti ile ıslanmış olmalıdır. Kirlenmiş çözeltileri yenisi ile değiştiriniz. Etki süresi geçtikten sonra aletleri temiz su ile dikkatlice yıkayınız ve kurutunuz. Tüm sirkülasyon prosedürleri için uyumludur. Mentşeleri korumak için SILIKON SPRAY veya SPECIAL ÖLSPRAY kullanınız. Dikkat: Çok kirli aletlerde Instru Plus Flüssig veya Desco Cleaner gibi non iyonik esaslı ek temizleyiciler kullanılması tavsiye edilir. Desco Cleaner, **Descoton %2 GDA** kullanılmadan önce kullanılır. Instru Plus Flüssig, **Descoton %2 GDA** ile kombine olarak da kullanılabilir. Dezenfeksiyon çözeltisi 14 gün boyunca kullanılabilir. Bununla birlikte çözeltide gözle görülür bir kirlenme meydana gelirse yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilir.

Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid (Tbc,Mycobacterium terrae,MRSA=multi resistant staphylococcus aureus dahil)
Fungusid
Sporosid
Virüs inaktive edici (HBV/HIV,HCV,BVDV,Vakzinia-virüs)

Bileşimi

100 g **Descoton %2 GDA** ;
2 g Glutardialdehid içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Görünüm : berrak, renksiz sıvı
pH değeri : 4,5 - 5,5
Yoğunluğu : ≈1,02

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic. A.Ş
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33
Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87
www.desomedeuro.com
E-mail: info@desomedeuro.com

Antimikrobiyal Özellikleri ve Etki Süreleri

Yeni DGHM/ÖGHMP/VAH yönetmeliklerine göre kantitatif süspansiyon testinde etkinlik süresi ,

(Bakteriler MRSA,TbC dahil,mantarlar) : 5dak.
Vakzinia,BVDV,HBV,HIV,HCV gibi
zarflı virüsler için : 30 sn.

Sporozid Etki Süresi : 1 saat

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj Şekilleri
5 litre bidon	3x5 litre

Dozajlama Yardımcıları

5 litre bidon için dozajlama pompası

Bilirkişi Raporları

Dr. Steinmann,virolog,Bremen:
BVDV(HCV) virüs etkinliği, 28.02.2006
Vakzinia virüs etkinliği, 02.03.2006
Dr. Rer.nat.Brill,Hamburg:
Bakterisid ve fungusid etkinliğine dair rapor,27.10.2006
Mycobacterium terrae etkinliğine dair rapor,27.10.2006.

Uyarılar

Descoton %2 GDA ilk defa kullanılıyorsa aletlerin özellikle endoskopların ve dezenfeksiyon kuvvetinin noniyonik bir temizleyici ile temizlenmesi önerilir. Tekstil ile temasından kaçınınız. (sarı lekeler) Solunm sistemi, cilt ve gözler için tahriş edicidir. Solunma ve cilt teması durumunda hassasiyete neden olabilir. Gözle temasta gözlerinizi bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Ürün ve bidonu güvenli şekilde bertaraf edilmelidir. Çalışma esnasında uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız.



Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Postfach 1162 D -34201
Melsungen/Almanya
Tel. : +049-5664-9496-0
www.schumacher-online.com