



## DESCO CLEANER

### Aldehitsiz ve Fenolsüz Tıbbi Aletler için Toz Temizleyici

- İyi Temizleme Özellikleri
- Hızlı etkinlik
- Ultrasonik yıkama cihazları ile temizlik prosedürü için uygundur.

#### Ürün Özellikleri

**Desco Cleaner**, metal, plastik, seramik, cam ve porselen tıbbi araç ve aletlerin etkili, hızlı temizliğinde kullanılan toz formda bir temizleyicidir.

Tıbbi aletler üzerinde yüksek miktarlarda kan ve protein artışı yüklemesinin olduğu durumlarda, Desco Cleaner tüm tıbbi alanlardaki, laboratuarlardaki aletlerin temizliğinde kullanılabilen ideal bir üründür.

#### Kullanım Alanları

**Desco Cleaner**, tüm tıbbi alanlardaki her türlü cerrahi aletlerin ya da laboratuarlardaki aletlerin, böbrek küvetleri, pensler, makaslar, kısıkaçlar, inhalasyon aletleri, plastik materyaller, laboratuvar cam malzemeleri, havanlar, porselen malzemeler, tüpler, şişeler, yıkama banyoları ve dental aletlerin temizlenmesinde kullanılır.

#### Kullanım Şekli

Aletler **kullanımdan hemen sonra** temizleme çözeltisinin içine konur. 10-20 dakika kadar etki etmesi beklenir. Temizlenecek olan bütün **yüzey ve boşluklar kullanım çözeltisi ile tamamen ıslanmış olmalıdır. Köpük oluşumu önlenmelidir.**(örn:tüplerde) Aletler ağır derecede kirliyse ise **Desco Cleaner'ın** dozajı ve/veya etki süresini arttırmak gerekir. Çözelti, kirlenme derecesine göre yenilenir. Çözeltiden çıkarılan materyaller dikkatlice yıkanır ve kurulanır.

**Desco Cleaner** ultrasonik yıkama cihazları ile yapılan tüm temizlik prosedürleri için uygundur.

#### Bileşimi

EU Detarjan Yönetmeliği'ne göre içindekiler: Non iyonik tensidler (<%5), anyonik tensidler (%5-15), fosfat (>%30)

Üründeki tüm yüzey aktif maddeler (tensidler) EU deterjan yönetmeliğine göre biyolojik olarak parçalanabilir.

#### İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.Aş.  
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33  
Torbalı / İzmir  
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87  
[www.desomedeuro.com](http://www.desomedeuro.com)  
E-mail: [info@desomedeuro.com](mailto:info@desomedeuro.com)



#### Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Görünüm: toz, açık yeşil  
pH değeri (%1'lik çalışma solüsyonu) :12+/- 0,5

#### Kullanım Konsantrasyonu

Kirlilik derecesine göre : % 0,5 - %1

#### Dozaj Talimatları

Çalışma solüsyonunun hazırlanması  
%0,5: 6 L suya 1 ölçü kaşığı  
Çalışma solüsyonunun hazırlanması  
%1: 3 L suya 1 ölçü kaşığı

#### Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
1 kg kutu	6 x 1 kg
5kg kova	1 x 5 kg

#### Dozajlama Yardımcıları

Ölçü Kaşığı

#### Uyarılar

Yanıklara sebep olur. Deri ve göz ile temasını engelleyiniz. Gözle temas etmesi halinde bol su ile yıkayınız, bir doktora başvurunuz. Kullanımı sırasında koruyucu kıyafet, eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanılmalıdır. (mümkünse bu etiketi gösteriniz) **Desco Cleaner, alet dezenfektanları için ek temizleyici değildir.** Sadece aldehitli ürünlerle (**Descoton Extra** gibi) kombine edilebilir. Bu kombinasyon yapıldığında çözeltinin dayanıklılık süresi 1 gündür.

#### Ruhsatlandırma

\* 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.



#### Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH  
Postfach 1162 D -34201  
Melsungen/Almanya  
Tel.:+049-5664-9496-0  
[www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)