
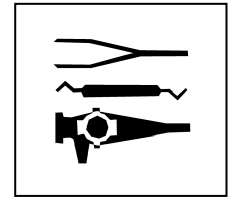


DESCOSEPT COMBI PULVER

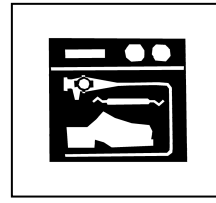

Daldırma banyoları ve otomatik makineler
için Tıbbi Alet Dezenfeksiyonu

Tıbbi Aletler İçin Toz Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddesi

Preparat Tipi

DESCOSEPT COMBI PULVER her türlü medikal aletin güçlü temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. DESCOSEPT COMBI PULVER medikal alanda hassasiyet yaratacık maddelerin kullanılmaması ile ilgili Alman Kanununun gerekliliklerini yerine getirir (TRGS 525/540).

Antimikrobiyal Özellikleri

- bakterisidal
- fungisidal
- virüs inaktive edici (poli ve adeno virus)*

* otomatik yıkayıcılarda 60°C programında

Kullanım alanları

Metal (anotlanmış alüminyum hariç), cam, seramik ve sentetik malzemeden yapılmış medikal aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Aynı zamanda aletlerin mükemmel temizliğini yapar. Descosept Combi Pulver forsepslerin oyuklarındaki kan ve protein artıklarını hızlı bir şekilde kolayca çözer.

Kullanım Şekli

Aletleri kullanımından hemen sonra çözelti içine açık olarak koyunuz. Dezenfekte edilecek yüzey ve boşluklar kullanım çözeltisi ile tamamen ıslanmış olmalıdır, aletler üzerinde hava kabarcığı oluşmamasına dikkat ediniz. Eğer gerekli ise boşluklar ve kavisli yerleri fırçalayınız. Etki süresi geçtikten sonra aletleri akan suyun altında dikkatlice yıkayınız ve kurulayınız.

Çözelti her gün veya kirlenme derecesine göre yenisi ile değiştirilmelidir. Descosept Combi Pulver ultrasonik banyolarda ve makineler ile dezenfeksiyon ve temizlikte kullanılabilir. Makinelerde kullanımda köpük oluşturmaz. Makineler ile kullanımda makinenin deterjan gözüne yeterli miktarda toz halindeki üründen koyunuz.

Dezenfeksiyon için makineyi 60°C programında çalıştırmanız yeterlidir.

Kullanım Konsantrasyonu

%1'lik çözelti elde etmek için 15 dk.
(3 litre suya 1 ölçü kaşığı koyunuz.)

%0,5'lik çözelti elde etmek için 60dk.
(6 litre suya 1 ölçü kaşığı koyunuz.)

Formaldehitsiz ve Fenolsüz

CE 0482

Bileşimi

Noniyonik tensitler(<%5), klor bazlı ağartıcı maddeler (<%5), fosfatlar (>%30) içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Verileri

pH değeri (% 0,5'lik çözeltinin) : ~12,20
pH değeri (% 2'lik çözeltinin) : ~ 12,56
İletkenlik (% 0,5'lik çözeltinin) : ~ 8-10 mS/cm

Ambalaj Şekilleri

Birim ambalaj	Koli içi adedi
850g kutu	6 x 850g
5 kg kova	1 x 5 kg

Dozajlama Yardımcıları

Ölçü kaşığı

Önemli Uyarılar

Anotlanmış Alüminyumların temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanmayınız! Çalışırken koruyucu eldiven kullanınız.

Dikkat: Önce tozu suda çözünüz daha sonra aletleri daldırınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında muhafaza ediniz.

Bilirkişi Raporları

Prof. Dr. Beckert, hijyen uzmanı, Lübeck:
Tıbbi alet dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu,
21.01.1993.

Listeleme

93/42 EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmıştır.