



Kullanıma Hazır Alet Dezenfektanı

CE 0482

Aldehitsiz ve Fenolsüz

Ürün Özellikleri

Endex®, tıbbi aletlerin tek işlemde temizliğini ve dezenfeksiyonunu gerçekleştiren kullanıma hazır bir preparattır. Endex, tamamen yeni sinerjistik aktif madde temeline dayanır. Aldehit ve Fenol içermez. İçerdiği etkili korozyon inhibitörleri sayesinde dezenfeksiyon işlemi esnasında malzemelere zarar vermez. Endex kullanımı sırasında rahatsız edici koku oluşturmaz, hoş kokuludur.

Kullanım Alanları

Endex®, rijid ve flexible tüm endoskoplarda, tüm cerrahi aletlerde, mikro invaziv cerrahi (MIC) aletlerinde, anestezi malzemelerinde temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılır. Aynı zamanda ultrasonik banyolarda da kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

Aletleri kullanımından hemen sonra çözelti içine açık olarak koyunuz. Dezenfekte edilecek yüzey ve boşluklar kullanım çözeltisi ile tamamen ıslanmış olmalıdır, aletler üzerinde hava kabarcığı oluşmamasına dikkat ediniz. Etki süresi geçtikten sonra aletleri akan suyun altında dikkatlice yıkayınız ve kurulayınız. Kirleşmiş çözeltiyi yenileyiniz. Tüm sirkülasyon prosedürleri için uygundur.

Dikkat : Çok kirli aletlerde ek deterjan olarak sadece non-iyonik bazlı ürünler kullanılmalıdır.

Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid MRSA dahil. (multi resistant Staphylococcus aureus)
Tüberküloid
Fungisid (C.albians)/levurosid
Virüs inaktif edici (HBV/HIV,HCV/BVDV, Vaccinia-, Papova-, polyoma-, Adeno-, Vaccinia-Virüs), Polio-Virüs (50°C)
Sporosid

Bileşimi

Endex®, DESOMEDAN ID'den %3 oranında DESOMED EURO KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından seyreltilerek ambalajlanmıştır.
100 g DESOMEDAN ID
3,75 g Cocospropylendiaminguanidiniumdiacetat,
5,63 g Didecylmethyloxethylammoniumpropionat içerir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Görünüm : Berrak, açık yeşil renkli çözelti
pH Değeri : 8 - 9
Yoğunluk 20°C'de : 0,9485-1,0483 g/cm³

Antimikrobiyal Özellikleri ve Temas Süreleri

KULLANIMA HAZIRDIR, SEYRELTMEYİNİZ!!!

DGHM/VAH rehberine göre bakterisid MRSA dahil, fungisid (C.albians) / levurosid etki etme süresi:

Kısa süreli etki : 15 dakika

Sporosid etki süresi : 120 dakika

Optimal koşullarda çözeltinin kullanım süresi 14 gündür.

Ambalaj Şekilleri

Ambalaj şekli	Dağıtım şekli
2 litre PE bidon	6 x 2 litre
5 litre PE bidon	3 x 5 litre

Önemli Uyarılar

Endex®, 'in ilk kullanımından önce kimyasal kalıntıları aldehitleri uzaklaştırmak için aletlerin, özellikle endoskoplardan ve dezenfeksiyon kuvvetinin non iyonik bazlı temizleyici ile (Descro Cleaner) ön temizliğini yapınız. Dikkat : toz haldeki temizleyiciyi sıcak suda tamamen çözünüz. Dar lümenli aletlerde, endoskoplardan gibi, Instru Plus Flüssig kullanılması tavsiye edilir. Larineks maskelerin dezenfeksiyonunda kullanmayınız. Kuarternar amonyum bileşiklerini içerir. Cildi tahriş edebilir. Bu sebeple çözeltinin göz, mukoz membran ve cilt ile temasını önleyiniz. Temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkayınız. Çalışırken koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Yutmayınız. Yutulduğu takdirde sağlığa zararlıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ruhsatlandırma

*DESOMEDAN ID, DGHM/VAH'ın alet dezenfektanları listesine kayıtlıdır.

* 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.

EU Authorised Representative
Dr. Schumacher GmbH
34201 Melsungen/GERMANY
Tel.: 056 84/9496-0
01805-SCHUMACHER
http://www.schumacher-online.com

Üretici Firma:

DESOMED EURO
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad.
No: 33 Torbalı / İZMİR
Telefon : 0 (232) 853 97 17
Fax : 0 (232) 853 90 69