


PERFEKTAN ENDO

Aldehitsiz Manuel Tıbbi Alet Dezenfektanı Özellikle Endoskoplar İçin

**Aldehitsiz
Fenolsüz
Pentax,Storz,Olympus-Winter &
Ibe tarafından test edilmiştir.
DGHM/VAH listesine kayıtlı
Dermatolojik olarak test edilmiştir**

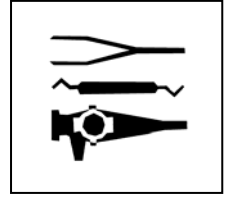

Tıbbi Alet / Endoskop Dezenfeksiyonu

CE 0482

Preparat Tipi

Perfektan Endo, tıbbi aletleri daldırma yöntemiyle temizleme ve dezenfekte etmek için kombine edilmiş bir preparattır.**Perfektan Endo**,tıbbi alet dezenfeksiyonuna yeni ölçüler getiren tamamıyla yeni , sinerjik bir yardımcı madde prensibi temelli , materyal koruyucu , aktif temizleyici bir tıbbi alet dezenfeksiyon maddesidir.Benzersiz bir tarzda , kullanıcılar tarafından uzun zamandır istenilen talepleri karşılar.

Perfektan Endo , düşük miktarlardaki etki gücü ile ekonomiktir.Korozyon inhibitörleri ihtiva eder ve aldehit, fenol içermez.Tüm materyallerle uyumluluk gösterir ve tüm bakterie,mantar ve virüs türlerine karşı yüksek etkilidir.Bu nedenle tıbbi alet dezenfeksiyonu için yeni RKI (Robert Koch Institute) rehberine göre temizleme ve dezenfeksiyon işlemi için mükemmel bir bileşimdir.Formülasyonunda aldehit bulunmaması nedeniyle protein bağlamaz.**Perfektan Endo** çalışma güvenliği açısından;insan sağlığı ile ilgili hassasiyet yaratacı maddelerin kullanılması ile ilgili belirlemelere uygundur.(TRGS 525/540)

Antimikrobiyal Özellikleri

Bakterisid (Tbc,Mycobacterium terrae,MRSA dahil)
Fungusid

Virusid (HBV/HIV,HCV,Papova/Polyoma,Adeno virüsleri,Polio virüs (50°C'de),Vaccinia virüs (20°C'de)
Sporosid (kalitatif süspansiyon testine göre) etkilidir.

Kullanım Alanları

Tek bir işlemde kısa süreli dezenfeksiyon ve temizleme.
Perfektan Endo , MIC-cerrahisi,anestezi materyalleri ve bükülür ve bükülmez endoskoplar dahil her tipteki cerrahi aletin dezenfeksiyonu için uygundur.

Kullanım Şekli

Tıbbi aletleri kullanımdan hemen sonra açık bir halde kullanım çözeltisi içine koyunuz. Dezenfekte edilecek yüzey ve boşluklar kullanım çözeltisi ile tamamen ıslanmış olmalıdır. Her kirlenmeden sonra çözeltiyi yenileyin.Dezenfeksiyon zamanından sonra tıbbi aletleri dikkatlice yıkayın ve kurulayın.Bütün sirkülasyon denemeleri ve ultrasonik aletler için uygundur.Kullanım çözeltisinin dayanıklılık sürelerine ilişkin bilirkişi raporları mevcuttur.Paslanmalara karşı korumak için **Silikon** – veya **Spezial Ölspray** kullanınız.

Uyarı:Tıbbi aletlerin çok kirlenmiş olması durumunda sadece **Instru-Plus** veya **Instru-Plus Pulver** gibi non-iyonik tensit bazlı temizleyiciler kullanınız.

Kullanım Konsantrasyonu

DGHM/VAH' a göre etki etme süresi: (MRSA dahil)	%1 60 dakika
	%2 30 dakika
	%3 15 dakika
Tbc	%1 60 dakika
	%2 30 dakika
	%3 15 dakika
Ultrasonik	%1 5 dakika
HBV/HIV inaktivasyonu	%1 60 dakika
	%2 15 dakika
HCV,BVDV inaktivasyonu	%1 5 dakika
Adeno virüs inaktivasyonu	%2 60 dakika
	%4 30 dakika
Papova/Polyoma virüs inaktivasyonu	%1 60 dakika
	%2 30 dakika
Vaccinia virüs inaktivasyonu	%1 30 dakika
	%3 15 dakika
Polio virüs inaktivasyonu(50°C)	%1 10 dakika

VAH: Uygulamalı Hijyen Birliği

DGHM: Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği

Bileşimi

100 g. içeriğinde;
3,75 g. cocospropylenediaminguanidindiasetat
5,63 g. didecyloxethylmetil amonyum propiyonat içerir

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
1 litre dozaj şişesi	10 x 1 litre
2 litre PE şişe	6 x 2 litre
5 litre PE bidon	3 x 5 litre

Dozajlama Yardımcıları

2 litre şişe ve 5 litre bidon için dozaj pompası,1 litre dozaj şişesi,bidon boşaltma musluğu,dozaj otomatı.

Önemli Uyarılar

Kimyasal artıkları (aldehit) uzaklaştırmak için, tıbbi aletleri ve banyoları **Perfektan Endo**'nun ilk kullanımından önce iyice temiz su ile ve **Desco Cleaner** ile temizleyiniz. Önemli:Toz temizleyiciyi tam olarak çözünüz.Dar lümenli (boşluklu) aletler için-örneğin endoskoplar- **Instru-Plus Flussig** tavsiye edilir.**Fa.KMTS**'nin tıbbi alet montaj banyolarında tavsiye edilmez! Larenjel maskelerinin dezenfeksiyonunda kullanmayınız.

Perfektan Endo cilt üzerinde primer tahriş olaylarına sebebiyet verebilir.Kullanım çözeltisini cilt ve göze temas ettirmeyiniz.Çözeltinin bulaştığı vücut bölgelerini hemen bol su ile dikkatlice yıkayınız.Koruyucu eldiven ve gözlük ile çalışma tavsiye edilir.Yutmayınız. Gerektiğinde **Zehir Araştırma Mrk. 0 800 314 79 00** no'lu telefonunu arayınız.

Bilirkişi Raporları

***Prof. Dr. Schubert**,Hijyenist, Frankfurt/M.:

-DGHM/VAH yönetmeliklerine göre tıbbi alet dezenfeksiyonuna ilişkin bilirkişi raporu, 23.12.2005

***Prof. Dr. Werner**,Hijyenist,Schwerin:

-DGHM/VAH yönetmeliklerine göre tıbbi alet dezenfeksiyonuna ilişkin 16.04.1998 tarihli bilirkişi raporu.

***Dr. Steinmann**,Virolog,Bremen:

-Adeno virüs etkinliğine ilişkin 03.02.1999 tarihli bilirkişi raporu,
-Papova/Polyoma virüs etkinliğine ilişkin 03.02.1999 tarihli bilirkişi raporu,

-Hepatitis B virüs etkinliğine karşı 03.09.1998 tarihli bilirkişi raporu,

-Polio virüs etkinliğine karşı 22.08.2000 tarihli bilirkişi raporu,

-Hepatitis C virüs (BVDV) etkinliğine karşı 14.11.2001 tarihli bilirkişi raporu.

-Vaccinia virüs etkinliğine karşı 24.07.2006 tarihli bilirkişi raporu

***Prof. Dr. Trautmann**,Hijyenist,Ulm:

-Ultrasonik alet dezenfeksiyonunda etkinliği ile ilişkili 06.06.2000 tarihli bilirkişi raporu.

***Dr. Färber**,Hijyenist,Gießen:

-Dayanıklılık sürelerine ilişkin 18.06.1997 tarihli bilirkişi raporu,
-Sporozid etkinliğine ilişkin 29.07.1997 tarihli bilirkişi raporu.

***Dermatest,Dr. Voß**,Dermatolog,Münster:

-29.04.1997 tarihli dermatolojik bilirkişi raporu.

***Olympus-Winter & Ibe**: Endoskoplarda kullanımına ilişkin 12.10.1999 tarihli bilirkişi raporu.

***Karl Storz** : Endoskoplarda kullanımına ilişkin 08.03.2002 tarihli bilirkişi raporu.

***Pentax**: Endoskoplarda kullanımına ilişkin 15.01.2001 tarihli bilirkişi raporu.

***Dr. Schumacher GmbH**,Melsungen:

Kullanıcı memnuniyetine ve uygunluğuna ilişkin kullanıcı anketi,Ekim-Şubat 1997.

PERFEKTAN ENDO

Aldehitsiz Manuel Tıbbi Alet Dezenfektanı Özellikle Endoskoplar İçin

***BAM (Alman Materyal Test Enstitüsü)**,Berlin:

-Dozajlama makinesi DG3 (Henkel) yardımıyla dezenfektanların kullanım konsantrasyonlarına ilişkin 25.05.2000 tarihli raporu.

***Philips Medical Systems GmbH:**

-Philips marka ultrasonlar üzerinde uygulanabilirliğine dair rapor, Mart.2005

***S.Bosse**,Melsungen:Perfektan Endo'nun temizleme yeteneğine ilişkin Eylül 1998 tarihli çalışması.

***Richard Wolf GmbH**

-Endoskoplar ile materyal testi,28.11.2002

***Vitalisklinik**,Bad Hersfeld:

-Pauldrach GmbH firmasının otomatik dozajlama ünitesi "Unicleaner D 40"için kullanılabileceğine dair rapor, 12.03.2000


Listeleme

DGHM/VAH listesinde yer almaktadır,kayıtlıdır

***DGHM** :Alman Mikrobiyoloji ve Hijyen Birliği

***VAH**: Uygulamalı Hijyen Birliği

**Aldehitsiz
Fenolsüz
Pentax,Storz,Olympus-Winter &
Ibe tarafından test edilmiştir.
DGHM/VAH listesine kayıtlı
Dermatolojik olarak test edilmiştir**

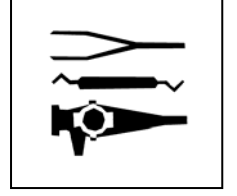

Tıbbi Alet / Endoskop Dezenfeksiyonu