

SPEZIAL ÖLSPRAY

Tıbbi Alet Bakım Spreyi

- **Etkili pas önleyicidir**
- **Buhar sterilizasyonu öncesi alet bakımında kullanılır.**
- **Toksikolojik olarak zararsızdır (Likit parafin sayesinde)**
- **Çok ekonomiktir.**
- **200 °C'ye kadar dayanıklıdır.**

Ürün Özellikleri

Spezial Ölspray, tıbbi aletlerin ve rijid endoskopların geniş kapsamlı bakımı için geliştirilmiş, özel bakım spreyidir. Fizyolojik açıdan zararsızdır. İçeriğindeki yağlar ise DAB ve LMBG'nin 31.maddesine göre toksik değildir. **Spezial Ölspray**, materyallere karşı mükemmel bir uyum sağlar.

Kullanım Alanları

Tıbbi aletlerin, rijid endoskopların, laparoskopi aletlerinin ve diş hekimliğinde kullanılan aerotor başlıklarının bakımını sağlar. Bu materyallerin metalden yapılmış kısımlarında aşınmayı önlemek için kullanılır. Materyallerde sıkça görülen paslanmayı, kararmayı, leke oluşumunu ve renk değişimini engeller. Albümin ve kan kalıntılarının materyallere yapışmasını önlediğinden dolayı daha kolay temizlenmesini sağlar.

Kullanım Şekli

Aletler;

Tıbbi aletlerin **dezenfeksiyon ve temizlik işleminden sonra** 25 cm uzaklıktan en küçük boşluklara temas edecek şekilde ince bir tabaka halinde uygulanır. Kalın tabaka şeklinde uygulama istenmeyen yağlanmaya sebep olabilir.


Açılı parçalar, menteşeler:

Günde 2 kez yaklaşık 1 saniye boyunca püskürtünüz. Bu işlemi aletlerin sterilizasyonundan önce ve otoklava girmeden önce tekrarlayınız. Ürünü uygulamak için spray şişesini dik tutunuz. Kullanmadan önce çalkalayınız.

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.Aş.
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33
Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87
www.desomedeuro.com
E-mail: info@desomedeuro.com

**Kloroflorokarbon içermez.
Ozonla dost**

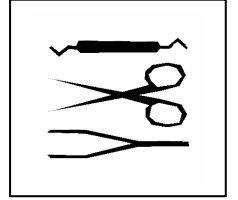

Tıbbi Alet Bakımı

Bileşimi

Likit parafin ve itici gazlar içerir.
(Kloroflorokarbon içermez)

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
500ml basınçlı sprey kutu	12 x 500ml

Uyarılar

Kutu basınçlıdır. Sıcaklığı **50 °C**'yi aşan ortamlardan ve **güneş ışığından** uzak tutunuz. Boşalmış kutuyu açmayınız ve eritmeye çalışmayınız. Yanıcıdır. Sıcak yüzeylere ve açık alev üzerine püskürtmeyiniz. Kıvılcım kaynaklarından ve sigaradan uzak tutunuz. Yeterli havalandırması olmayan ortamlarda patlayıcı karışım oluşumu mümkündür. Latex veya kauçuk materyallerde şişme yapabilir. Bu gibi durumlarda **Silikon Spray** kullanınız.

Ruhsatlandırma

* 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.



Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Postfach 1162 D -34201
Melsungen/Almanya
Tel.: +049-5664-9496-0
www.schumacher-online.com