


THERMOTON CLEAR

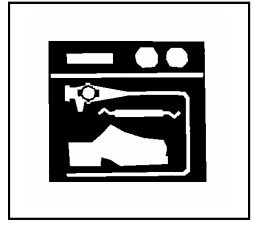

Tıbbi Alet Dezenfeksiyonu (Makine)

Yıkama ve Dezenfeksiyon Makineleri İçin Durulama ve Parlatma Solüsyonu

*Biyolojik olarak
indirgenabilir.*

Preparat Tipi

Thermoton Clear, tıbbi yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için nötrale etkili, durulayıcı ve parlatıcı özellikte bir solüsyondur. Formülasyondaki özel köpüksüz yüzey aktif maddeleri, tüm materyallerde lekesiz kurumayı sağlar. Ayrıca korozyon inhibitörleri sayesinde mükemmel materyal uyumluluğu vardır. **Thermoton Clear**, alkali temizleyicilerden sonra nötralizasyon solüsyonu olarak kullanılır. Yıkama makinelerinde kireç oluşumunu önler.

Kullanım Alanları

Thermoton Clear, dezenfeksiyon ve temizleme makinelerinde makine üreticisinin talimatlarına göre **termolabil ve termostabil tıbbi aletler ve materyallerinin ana temizliği ve dezenfeksiyonundan sonraki durulama ve parlatma** işlemi için tavsiye edilir.

Thermoton Clear, ayrıca kemotermik temizleme, dezenfeksiyon ve termik hasta altlığı yıkama makinelerinin (sürgü yıkama makinesi) kireçten arındırılması için de kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

Materyalleri tavsiyelere uygun olarak (Örn: hijyen planı) makineye yerleştiriniz. Bütün yüzeyler ve boşluklar makine dezenfeksiyonu ve temizliği için uygun olmalıdır. **Thermoton Clear**'i ana temizlemeden sonraki temizlik işlemi için makine üreticilerinin talimatlarına uygun olarak ilave ediniz.

Dikkat!!! (Program ayarlarına dikkat ediniz.)
Dozajlama 35°C'den itibaren.

Bileşimi

Sitrik asit,
Alkol,
Tensit
Korozyon inhibitörleri içerir.

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.Aş.
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33
Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87
www.desomedeuro.com
E-mail: info@desomedeuro.com

CE

Kimyasal ve Fiziksel Verileri

Konsantrenin görünümü	:berrak,renksiz çözelti
pH değeri %0,5'lik çözelti	:yaklaşık 3,5
pH değeri konsantre çözelti	:1,5 - 3
Yoğunluk (20 C'de)	:1,02g/ml

Kullanım Konsantrasyonu

Her kullanım bölgesinden sonra	: yaklaşık %0,001
Nötralizör olarak	:%0,1-0,3
Termal yıkama	:%0,5-1,5
Makinelerinde hasta altlığı dezenfeksiyonunda (yüksek su sertliklerinde)	

Önemli Uyarılar

Gözler ile temas etmesinden kaçınınız. Gözlerle temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj	Art.no.
5-litre PE bidonu	3 x 5 litre	00-116-051

Dozajlama Yardımcıları

Bidon aktarma musluğu, bidon için dozaj pompası

Listeleme

*93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.



Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Postfach 1162 D -34201
Melsungen/Almanya
Tel.:+049-5664-9496-0
www.schumacher-online.com