


Thermoton® N

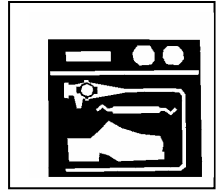

Tıbbi Alet (Makine)

Yıkama ve Dezenfeksiyon Makineleri İçin Nötralizasyon Solüsyonu

- Fosforik asit bazlıdır.
- Kalsifikasyonu azaltır.
- Korozyon inhibitörleri içerir.

Ürün Özellikleri

Thermoton® N, özel yıkama makinelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış medikal temizlik ve dezenfeksiyon için asidik nötralizasyon solüsyonudur. **Thermoton® N**, alkali temizleyicinin kullanımından sonra ilk durulama suyuna ilave edilir.

Kullanım Alanları

Thermoton® N, yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılan temizleyicilerle yapılan ana yıkama işleminden arta kalan **alkali artıklarının nötralizasyonu** ve özel yıkama makinelerindeki muhtemel **kireç tortularının ortadan kaldırılması** için kullanılır. Tıbbi aletlerin kararmasını ve renk değiştirmesini önler.

Thermoton® N, ameliyathanelerde, anestezi ve bakım ünitelerinde aletlerin yeniden işleme hazırlanmasında kullanılır. Mikrobiyoloji ve laboratuvarlar içinde kullanımı uygundur.

Thermoton® N; RKI* (BGA) ve Vario programlarına uyumludur ve her tipteki makineler için kullanılabilir.

"Miele makinelerinde kullanımı onaylanmıştır."

Kullanım Şekli

Thermoton® N, alkali temizleyicinin kullanımından sonraki ilk durulama suyuna ilave edilir.

Bileşimi

Fosforik asit
Kompleks oluşturmalar
Korozyon inhibitörleri içerir.

Kimyasal ve Fiziksel Verileri

Konsantrenin görünümü : berrak, renksiz sıvı
pH değeri, konsantrasyon : 0,8+/-0,4
Yoğunluk, 20°C : 1,14g/ccm+/-0,010

İthalatçı Firma:

Desomed Euro Kimya San.ve Tic.Aş.
Yazıbaşı Beldesi Balkan cad. No:33
Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 97 17 Faks: 0232 853 94 87
www.desomedeuro.com
E-mail: info@desomedeuro.com

CE

Kullanım Konsantrasyonları

1ml / (%0,1) litre genel kullanım
3ml / (%0,3) litre yüksek kirlilik durumunda.

Dozajlama, normalde makinalardaki dozaj pompasıyla otomatik olarak yapılır.

Ambalaj Şekilleri

Açıklama	Ambalaj
5 litre PE bidon	3 x 5 litre

Dozajlama Yardımcıları

Bidon aktarma musluğu, bidon için dozaj pompası

Ruhsatlandırma

*93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygundur.



Üretici Firma:

Dr.Schumacher GmbH
Postfach 1162 D -34201
Melsungen/Almanya
Tel.:+049-5664-9496-0
www.schumacher-online.com